



FINISH

# Jiffy™

ORIGINAL COMPOSITE SYSTEM

CUPS, DISKS, AND POINTS

مولت های پرداخت اولترادنت

- رابره های حاوی ساینده های سیلیکونی (silicon-impregnated)
- سه قدرت سایندگی متفاوت: سبز (Coarse)، زرد (Medium) و سفید (Fine)
- عاری از مواد لاتکس
- عالی برای کاتتورینگ، فینیشینگ و پالیش کامپوزیت های amelog-en-plus, Vit-I-escence و سرامیک ها
- در سه فرم کاپ، پوینت و دیسک
- مولت کاپ: مناسب برای پالیش کاسب ها، سطح لبیال و باکال و طوق دندان ها
- مولت دیسک: مناسب برای پالیش سطوح لبیالی
- مولت پوینت: مناسب برای سطوح اوکلوزالی و لبیال
- بسته بندی

تک رنگ و تک مدل  
آسورت



موارد مصرف:

ابتدا با رابر سبز coarse، ناصافی های بزرگ تر را حذف کنید. در ادامه از رابره های زرد رنگ medium برای صاف کردن بیشتر نواحی ناصاف استفاده کنید. در انتها با یک رابر سفید رنگ fine، سطح را فینیش کنید.

سرعت های پیشنهادی هندپیس برای سختی های مولت ها:

مولت سفید: 5,000 تا 7,500 RPM

مولت سبز و زرد: 7,500 تا 10,000 RPM



ULTRADENT  
PRODUCTS, INC.

golnarnikandandan



www.golnarnikandandan.com



021-71333340

GOLNAR®  
NIKAN DANDAN