



WHITEN

Opalescence

● ● ● go™
Tooth Whitening

Opalescence GO 10%, 15%

۱۵٪ هیدروژن پروکساید

این محصول دارای تری های پیش ساخته ای بنام ultrafit است که به راحتی برای تمام افراد قابل استفاده هستند. این تری ها از مولر یک سمت تا مولر سمت مقابل را پوشش می دهند و این باعث اطمینان از رسیدن ژل به دندانهای خلفی می شود.

تطابق عالی تری ultrafit باعث تماس حداکثری ژل با دندان در طی بلیچینگ می شود.

ژل سفید کننده Opalescence GO حاوی PF (نیترات پتاسیم و فلوراید) است. تحقیقات نشان داده که نیترات پتاسیم باعث کاهش حساسیت می شود. فلوراید نیز باعث کاهش پوسیدگی و افزایش استحکام مینا می شود و این ویژگی های مهم باعث افزایش سلامت کلی دندان می شود.

- ۱۰ درصد - استفاده به مدت ۳۰-۶۰ دقیقه به مدت ۵-۱۰ روز
- ۱۵ درصد - استفاده به مدت ۱۵-۲۰ دقیقه به مدت ۵-۱۰ روز
- تری های راحت و از قبل پر شده، درست بعد از خروج از بسته بندی قابل استفاده اند.
- حجم مناسب ژل، امکان تمیز کردن راحت آن را بعد از بلیچینگ ایجاد می کند.
- بسته بندی: ۴ پک ۲ تری برای فک بالا و پایین



موارد مصرف Opalescence GO

این محصول برای بیمارانی توصیه می شود که به دنبال بلیچینگ حرفه ای هستند. به دلیل عدم نیاز به قالبگیری، کست و مراحل لابراتواری، Opalescence GO یک روش عالی برای بلیچینگ خانگی می باشد.



Before

After

Results from 10 days of Opalescence Go 10% whitening.



GOLNAR®
NIKAN DANDAN

golnarnikandandan

www.golnarnikandandan.com

021-71333340



WHITEN

Opalescence

● ● ● go™
Tooth Whitening



نحوه استفاده برای بیماران

1. محصول را از پکیج خارج کنید.
2. تری بالایی را روی دندان ها بگذارید.
3. تری ها را فیکس کنید و برای 2 ثانیه آن را بمکید.
4. تری خارجی سبز رنگ را از دهان خارج کنید، تری سفید رنگ را درون دهان بگذارید. همین کار را برای تری پایینی هم انجام دهید.
5. پس از گذشت زمان تعیین شده، تری های سفید کننده را بردارید و دندان هایتان را مسواک بزنید.

نحوه استفاده



10% | 30–60 min.

15% | 15–20 min.



GOLNAR
NIKAN DANDAN

golnarnikandandan



www.golnarnikandandan.com



021-71333340