



WHITEN

Opalescence™
whitening toothpaste



Opalescence PF

15%, 20%, 35%, 45%

ژل اوپال سنس PF

ژل سفید کننده Opalescence حاوی PF (نیترات پتاسیم و فلوراید) است. تحقیقات نشان داده که نیترات پتاسیم باعث کاهش حساسیت می شود. فلوراید نیز باعث کاهش پوسیدگی و افزایش استحکام مینا می شود. تمامی این ویژگی ها باعث افزایش سلامت کلی دندان می شوند.

- فرمولاسیون مخصوص برای جلوگیری از دهیدراسیون و برگشت رنگ دندان
- چهار غلظت متفاوت برای ایجاد انعطاف پذیری در درمان
- سه طعم مختلف
- قابل استفاده در شب و روز
- ژل چسبناک غلیظ که به سمت بافت نرم حرکت نمی کند و قرارگیری صحیح تری روی دندانها را تضمین می کند.

بسته بندی های موجود:

2 سرنگ 1/2 میل

کیت 8 سرنگ 1/2 میل

فرمولاسیون چسبناک و غلیظ Opalescence، برخلاف سایر ژل های بلیچینگ، از داخل تری بیرون نمی زند. 20 درصد محتوای آب، مانع بروز دهیدراسیون و برگشت رنگ دندان می شود. این ویژگی ها، Opalescence را به قابل اطمینان ترین ژل بلیچینگ موجود تبدیل کرده است.



Before

After



GOLNAR®
NIKAN DANDAN

golnarnikandandan

www.golnarnikandandan.com

021-71333340



WHITEN

Opalescence™ whitening toothpaste



دستورالعمل کار با ژل اوپال سنس PF

مرحله اول: یک تری را تقریباً تا نیمه سمت بالایی تری از مولار به مولار پر کنید. باید حدود 1.2 تا 1.3 میل از یک سرنگ در هر تری استفاده شود.

مرحله دوم: تری را در دهان خود قرار دهید و به آرامی روی آن ضربه بزنید تا کناره‌های آن با دندان‌هایتان سازگار شود. مدت زمان استفاده با توجه به غلظت بلیچینگ متفاوت است.

زمانبندی استفاده:

Opalescence PF 15%: 4 تا 6 ساعت ▶

Opalescence PF 20%: 2 تا 4 ساعت ▶

Opalescence PF 35%: 30 تا 60 دقیقه ▶

Opalescence PF 45%: 15 تا 30 دقیقه ▶

اگر هر گونه حساسیت قابل توجهی احساس کردید، درمان خود را متوقف کنید و با دندانپزشک خود صحبت کنید.

مرحله سوم: ژل اضافی را با یک مسواک نرم پاک کنید.

مرحله چهارم: تری را با مسواک نرم و آب تمیز کنید. در جعبه ای که تری ارائه شده نگهداری شود.



Custom Whitening Tray
(Requires Impression)



GOLNAR
NIKAN DANDAN

golnarnikandandan

www.golnarnikandandan.com

021-71333340