



WHITEN

# UltraEZ™

Desensitizing Gel  
with Potassium Nitrate and Fluoride



- ژل ضد حساسیت اولترا ایز دارای نیترات پتاسیم و فلوراید می باشد
- قابل استفاده توسط تری اختصاصی و یا تری های Ultrafit
- ایجاد نتیجه فوری
- حذف حساسیت
- موجود در سرنگ یا تری های یک بار مصرف
- ژل ضد حساسیت Ultra-EZ حاوی ۳% نیترات پتاسیم و ۰.۲۵% سدیم فلوراید می باشد.

بسته بندی های موجود:



- بسته بندی ۴ سرنگی ۱/۲ میل
- بسته بندی ۴ تری آماده برای دو فک بالا و پایین حاوی ژل



UltraFit™ Ready-To-Go Tray



Custom Whitening Tray  
(Requires Impression)



**GNO** GOLNAR®  
NIKAN DANDAN

golnarnikandandan

www.golnarnikandandan.com

021-71333340



## نحوه استفاده و کار با سرنگ های ژل اولترا ایز

مرحله اول: ژل اولترا ایز را روی تری های کاستوم تزریق کنید. یک چهارم تا یک دوم سرنگ را در تری تزریق کنید. اگر می دانید محل حساسیت و دندان های حساس کدام هستند، مقدار بیشتری از سرنگ در آن ناحیه تزریق شود.

مرحله دوم: پیش از قرار دادن تری در دهان حتما دندان ها را مسواک کنید.

مرحله سوم: گوشه های تری ها را به آرامی در خلاف جهت لبیالی و پالاتالی فشار دهید.

مرحله چهارم: با انگشت یا یک مسواک تمیز ژل اضافی را بردارید.

مرحله پنجم: با قرار دادن تری در دهان، زمان درمان آغاز می شود.

مرحله ششم: در آخر، دندان ها را مسواک بزنید، و مراقب باشید ژل اولترا ایز را نبلعید. برای شستن تری ها از آب سرد و مسواکی با براش نرم استفاده کنید.



## نحوه استفاده و کار با تری های آماده ژل اولترا ایز

مرحله اول: تری ها را از پکیج خارج کنید.

مرحله دوم: تری را در دهان قرار دهید.

مرحله سوم: تری را به آرامی فشار دهید. (تا در جای خود ثابت شود)

مرحله چهارم: روکش سبز رنگ تری را از دهان خارج کنید.

مرحله پنجم: دوباره تری را در دهان ثابت کنید.

مرحله ششم: این کار را هر روز به مدت ۱۵ دقیقه تا ۱ ساعت یا براساس دستور پزشک انجام دهید.

