



FINISH

PermaSeal™

Penetrating Composite Sealer

سیلر کامپوزیتی

حفره ها و میکرو ترک هایی را که در حین فرایند پرداخت ایجاد می شود، مهر و موم می کند و چند رنگی و سایش را به حداقل می رساند.

- به کامپوزیت و مینای اچ شده باند میشود.
- میکرو ترک ها را میبندد و ترمیم را تقویت میکند.
- محافظت و احیا کننده ترمیم های کامپوزیتی.
- Certified gluten free
- بسته بندی ۴ سرنگ ۱.۲ میل



برای ترمیم های جدید
بعد از ترمیم و پالیش نهایی ، ناحیه ی مورد نظر را 5 ثانیه اچ کنید و سپس پرماسیل را قرار دهید تا کامپوزیت شما را سیل کند و نمایی شفاف به آن ببخشد.
کمی پوآر هوا بگیرید و سپس 10 ثانیه لایت کنید.
برای ترمیم های قدیمی
سطح وحاشیه ی مورد نظر را تمیز کنید.
مینای دندان در قسمت مجاور ترمیم و همچنین کامپوزیت ترمیم را به مدت 15 ثانیه اچ کنید ، اگر سطحی از مینای دندان در دسترس نیست به مدت 30 ثانیه اچ کنید، کمی پوآر هوا بگیرید و سپس 10 ثانیه لایت کنید.



GOLNAR®
NIKAN DANDAN

golnarnikandandan



www.golnarnikandandan.com



021-71333340