



WHITEN

KleerView™

CHEEK AND LIP RETRCTOR



**در سایز بزرگسال
موجود است.**

مناسب برای کاربردهای مختلف

۱. بلیچینگ داخل مطب
۲. انجام پروسه های باندینگ و ترمیم کامپوزیت
۳. فتوگرافی های بالینی
۴. برخی درمان های ارتوdontی

همچنین قابل استفاده به دفعات هست



GND GOLNAR®
NIKAN DANDAN



golnarnikandandan



www.golnarnikandandan.com



021-71333340

دهان باز کن کنار زننده لب و گونه

- دارای استاندارد از اتحادیه ای اروپا و برچسب CE میباشد.
- این دهان باز کن از پلاستیک بسیار منعطف ساخته شده است.
- بنابراین به راحتی داخل دهان بیمار جایگذاری و خارج میشود.
- طراحی منحصر به فرد این محصول امکان دید بسیار مطلوب در قوس فوقانی و همچنین دسترسی به نقاط خلفی را امکان پذیر میکند.

نحوه استریل:

از پاک کننده خفیف و یا اسفنج برای تمیز کردن و شستشوی باقی مانده خون، و یا بزاق قبل از قرار دادن در یک محلول گند زدای سرد استفاده کنید.

۱. در DISINFECTOR با دمای 90 درجه سلسیوس قرار دهید.
۲. در بسته های جدا در کیسه های مخصوص در اتوکلاو با دمای ۱۲۱ درجه سلسیوس قرار دهید.
۳. با یک پارچه ساده خشک کنید.
۴. با حرارت خشک استریل نکنید.