



WHITEN

# Opalescence™ Endo Whitening

## Non-Vital "Walking Bleach"



Applied In-Office

### کیت بلیچینگ اندو ۳۵%



### 35% hydrogen peroxide

- هیدروژن پروکساید ۳۵%
- قرار گیری آسان در داخل اتاقک پالپی
- درمان ۳-۵ روزه

موارد مصرف:

این محصول به طور ویژه برای سفید کردن دندان های درمان ریشه شده دارای بدرنگی فرموله شده است. در تکنیک walking bleach، ژل به مدت ۳-۵ روز در دندان باقی می ماند و در جلسه بعدی درمطب تعویض می گردد.



Opalescence™  
tooth whitening systems



Before



After



Before



After



**GNO** GOLNAR®  
NIKAN DANDAN

golnarnikandandan

www.golnarnikandandan.com

021-71333340



WHITEN

# Back to bright

## Opalescence Endo Whitening

### ④ نحوه استفاده و کار با اوپال سنس اندو

- مرحله اول: پیش از شروع درمان با اوپال سنس سفیدکننده اندو، گلس آینومر را روی سطح پالپ چمبر قرار دهید. ژل سفیدکننده اوپال سنس اندو را قرار دهید.
- مرحله دوم: دندان را با پانسمان موقت پانسمان کنید.
- مرحله سوم: مقدار اضافی خمیر پانسمان را حذف کنید.
- مرحله چهارم: درمان به پایان رسید.
- مرحله پنجم: بلیچینگ اندو را به راحتی از دندان حذف کنید.



Step 1




Step 2



Step 3



Step 4

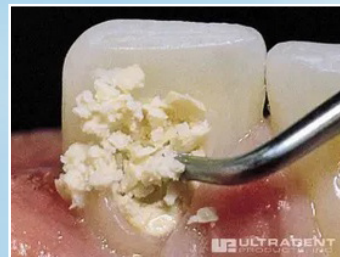

Step 5

..... مراحل فوق را ۳ تا ۵ مرتبه با فواصل زمانی ۳ تا ۵ روز انجام دهید تا به نتیجه دلخواه برسید.



golnarnikandandan

www.golnarnikandandan.com

021-71333340