



WHITEN

# OpalDam™ Green

## Light-Cured Resin Barrier

### محافظ لثه اوپال دم گرین اولترادنت

- حفاظت از بافت نرم با ایجاد یک سیل غیر قابل نفوذ
- برداشت آسان
- استفاده مستقیم
- رنگ سبز و سطح براق و منعکس کننده



### موارد مصرف:

Opaldam یک رزین با بیس متاکریلات است که به عنوان یک سد محافظت کننده برای ایزولاسیون بافت نرم مجاور دندان تحت درمان بلیچینگ استفاده می شود. در موارد سفید کردن تک دندان، Opaldam برای محافظت از دندان های مجاور هم استفاده می شود. این ماده کاملاً نور را منعکس می کند تا حرارت و حساسیت بافتی متعاقب کیورینگ به حداقل برسد. Opaldam یک سد ایمن و عاری از خطا در حین بلیچینگ در مطب ایجاد می کند.



**GOLNAR**  
NIKAN DANDAN

golnarnikandandan

www.golnarnikandandan.com

021-71333340



WHITEN

# OpalDam™ Green

## Light-Cured Resin Barrier

### نحوه استفاده و کار با اوپال دم گرین

**مرحله اول:** اوپال دم رزین بریر را تا حدود ۴-۶ میلی متر از لثه تزریق کنید. فضاهای اینترپروگزیمال را کامل بپوشانید. حدود ۰.۵ میلی متر از ناحیه انامل خشک را هم رزین تزریق کنید تا به طور کامل این ناحیه پوشیده شود. رزین را از یک دندان به دندان بعدی بکشید. با موشن اسکیننگ حدود ۲۰ ثانیه این نواحی را لایت کیور کنید.

**مرحله دوم:** سریعاً نواحی رزین کیور شده را تمیز کنید و به طور کامل یا در تکه های بزرگ رزین ها را بردارید. نواحی اینترپروگزیمالی را بررسی کنید تا رزین های باقی مانده را هم پاک کنید. طراحی اوپال دم و اوپال دم گرین رزین بریرها به گونه ای است که بتوانید سریع و راحت آنها را از منافذ و برش ها به راحتی جدا کنید.



# Complete protection you can see

۱ سرنگ ۱/۲ میل با تیپ مخصوص



golnarnikandandan

www.golnarnikandandan.com

021-71333340