



Caries indicator

Sable™ Seek™

نشانگر پوسیدگی

محلول آشکار ساز پوسیدگی sable seek، حاوی رنگ های FD&C و محلول seek. حاوی رنگ های D&C در پایه گلیکول است که باعث رنگ گرفتن عاج پوسیده می شود.

• مشخص کننده عاج دمینرالیزه

• امکان استفاده دقیق


• رنگ سبز برای سهولت در تشخیص پوسیدگی

• چهار سرنگ ۱.۲ میل



موارد مصرف:

در نواحی با دید و دسترسی سخت، محلولهای آشکار ساز پوسیدگی، تشخیص عاج دمینرالیزه را تسهیل می کنند. برای مثال در پوسیدگی های کلاس یک و دو و سه و یا در ناحیه ل DEJ، محلول سبز رنگ sable seek مانع برداشت بیش از حد نسج دندان و کاهش احتمال اکسپوژر، پالپی در پوسیدگی های عمیق می شود. عاج دمینرالیزه بایستی برای بهبود قدرت باند ترمیم حذف شود.

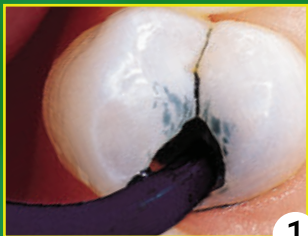

1



2



3



4

• مرحله اول: نشانگر را قرار دهید و پوآر آب و هوا بگیرید.

• مرحله دوم: پوسیدگی ها قابل رؤیت می شوند.

• مرحله سوم: پوسیدگی ها را با دور کند فرز روند یا

اکسکویتور حذف کنید.

• مرحله چهارم: مراحل فوق را مجدد تکرار کنید تا تمام

پوسیدگی ها حذف شوند.