



Astringedent™

15.5% FERRIC SULFATE

"CAN'T LIVE WITHOUT" product

محلول خون بند سولفات فریک ۱۵.۵%



- شناخته شده به عنوان عامل هموستاتیک "کلاسیک"
- متوقف کردن خونریزی در چند ثانیه
- کاهش نیاز به تکرار قالبگیری های هزینه بر
- محلول فریک سولفات ۱۵.۵% با Ph حدود ۱
- حذف آلودگی ناشی از مایع شیار لثه به هدف برقراری باندینگ ایده آل
- بطری شیشه ای ۳۰ میل



موارد مصرف:

برای کنترل موثر و آسان خونریزی، مدیریت بافت و پالپوتومی پیشنهاد می شود این محصول در تعداد زیادی از درمانهای دندانپزشکی و جراحی دهان مثل پروتز ثابت ترمیمی، درمانهای پیرودنیتال و سایر درمانها کاربرد دارد. Astringedent همچنین برای رتروفیلینگ، نهفتگی های کانین، جینجیوکتومی و بعنوان فیکس کننده در پالپوتومی پیشنهاد می شود. یک رشته نخ Ultrapak را در Astringedent غوطه ور کنید و بافتها را ایزوله نمایید. بعد از آن از اسپری آب و هوا استفاده کنید.

نحوه استفاده از Astringedent

مرحله اول: با تیپ Dento-Infusor ، محلول را روی بافت درحال خونریزی قرار دهید.
 مرحله دوم: با فشار بالا آب/ هوا را اسپری کنید تا لخته های باقی مانده از بین برود و عمق هموستاتیک را چک کنید. اگر همچنان خونریزی بند نیامد، این مرحله را تکرار کنید.
 مرحله سوم: پس از آنکه خونریزی متوقف و فشردگی ایجاد شد، با استفاده از Ultrapak™ packer نخ های اولتراپک را در لثه قرار دهید.

نحوه استفاده



1



2



3

