



VISCOSTAT™ CLEAR — VISCIOUS HEMOSTATIC —

ژل هموستات ویسکواستات شفاف

(آلومینیوم کلراید ۲۵٪)

25% Aluminum chloride



- خونریزی های جزئی در ناحیه زیبایی را مهار می کند
- هیچ بقایا یا لکه ای به جا نمی گذارد
- ارائه به صورت ژل با ویسکوزیته بالا
- به راحتی در محل قرار می گیرد
- عدم تداخل با باندینگ
- سرنگ ۳۰ میل پر شده به همراه ۵ عدد سرنگ ۱.۲ میل خالی

ViscoStat Clear ژل کلرید آلومینیوم برای نواحی زیبایی و قدامی پیشنهاد می شود. زیرا خونریزی را در چند ثانیه متوقف می کند و هیچ اثری از خود به جا نمی گذارد. همچنین بسیار مناسب برای بند آمدن خونریزی در نواحی است که در طول درمان نیاز به عمل باندینگ دارند، زیرا هیچگونه تداخلی با عامل باندینگ ندارد.



موارد مصرف:

از این محصول برای کنار زدن سالکوس لثه قبل از قالبگیری و برای کنترل خونریزی و کنترل تراوشات لثه در دندانپزشکی ترمیمی استفاده می شود. این محصول همراه نخ های کنار زننده لثه قابل استفاده است. این ژل، قراردهی نخ در شیار لثه را تسهیل می کند.





VISCOSTAT™
CLEAR
— VISCIOUS HEMOSTATIC —

نحوه استفاده از ژل هموستات ویسکواستات شفاف

مرحله اول: آماده سازی لثه و ناحیه خونریزی

مرحله دوم: ژل هموستات را روی محل خونریزی قرار دهید. با ژل شفاف می توان به راحتی تمامی مناطق را دید و سریع شستشو داد.

مرحله سوم: نخ اولتراپک آغشته به ژل را دور دندان آماده شده فشار دهید. اجازه دهید به مدت ۵ دقیقه بماند.

مرحله چهارم: نخ را بردارید. با پوآر هوا خشک کنید. دوباره ژل را در ناحیه سالکس فشار دهید. اجازه دهید به مدت ۱ دقیقه بماند.

مرحله پنجم: برای بار آخر شستشو دهید. خشک کنید و قالب گیری کنید. در صورت نیاز این مراحل را دوباره تکرار کنید.

مرحله ششم: درمان در عرض دو هفته به پایان می رسد.

نحوه استفاده



1



2



3



4



5



6

