



Simple. Esthetic. Efficient

DIRECT COMPOSITE TEMPLATE SYSTEMS

Direct Veneer Template

قالب پیش ساخته کامپوزیت ونیر مستقیم

قالب پیش ساخته یونیر تنها قالب طراحی شده برای ایجاد روکش های مستقیم کامپوزیت و منحصر به برند Ultradent است. قالب های Uveneer extra و Uveneer ، الگوهایی منحصر به فرد و کم خطا هستند، روکش های کامپوزیتی زیبا با تقارن و شکل دندان طبیعی را شبیه سازی می کنند و به منظور ایجاد ترمیم های قدامی با کیفیت بالا و آناتومیک طراحی شده اند و نیاز به حداقل تنظیم و یا پرداخت برای رسیدن به نتایج مورد نظر را دارند. قالب ها در دو پکیج متفاوت آماده ی عرضه هستند.



The original Uveneer template kit

- دارای دو سایز مدیوم و لارج
- برای ۸ دندان قدامی
- فک بالا و فک پایین
- ۳۲ عدد قالب



Uveneer Extra templates

- دارای ۴ سایز ، ایکس لارج، لارج، مدیوم، و مربع شکل
- ۶ دندان قدامی
- فقط فک بالا (کائین تا کائین)
- ۲۴ عدد قالب




Veneer Templates Promise a Beautiful Symmetry

A Way to Provide Unique and Natural Smiles



جهت راهنمایی و سهولت در استفاده ، شماره دندان و ناحیه ی قرار گیری آن در نیم فک ، روی دسته ی تمامی قالب ها درج شده است.

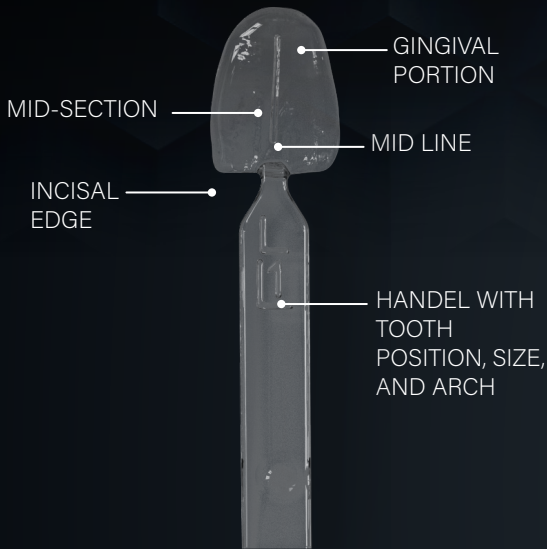

- هر قالب، روکش های کامپوزیتی آناتومیک و زیبایی با شکل و تقارن قابل پیش بینی ایجاد می کند.
- به راحتی از رزین کامپوزیت کیور شده جدا می شود.
- از آن ها می توان برای ایجاد روکش های موقت در طول ایجاد روکش های پرسن و همچنین ساخت موکاپ و انتخاب شید رنگ مناسب استفاده کرد.
- قابل اتوکلاو (قابل استفاده به دفعات) که این محصول را به انتخابی مقرون به صرفه تبدیل میکند.
- *(پایه ای که قالب ها در آن قرار دارد قابل اتوکلاو نیست، بلکه فقط خود قالب ها اتوکلاوبل هستند)
- به حداقل زمان تنظیم و پرداخت وقت نیاز دارد. در وقت صرفه جویی می کند.

Missing Lateral Incisor and Peg Lateral



Before



After

Upper Arch Restoration for Eight Teeth



Before



After

Upper Arch Restoration



Before



After

Esthetic Alternative to Partial Dentures



Before



After



veneer™
dental art made simple

veneer®
EXTRA

دستورالعمل گام به گام استفاده از قالب یونیر

۱. قالب مناسب دندان مورد نظر خود را پیدا کنید، به شماره ی دندان و سایز قالب رو بدنه ی قالب توجه کنید.
۲. پوسیدگی های روی دندان را حذف و دندان را آماده ترمیم کنید.
۳. دندان های مورد نظر را اچ و باند کنید.
۴. مقدار کامپوزیت مورد نیاز را روی دندان مورد نظر قرار دهید (آن را کیور نکنید).
۵. الگو را روی دندان قرار دهید، الگو باید به طور ایده آل تمام سطح لبیال دندان را پوشش دهد.
۶. کامپوزیت اضافی را از حاشیه قالب بردارید و سپس کیور کنید.
۷. قالب را از دسته ی آن گرفته و به آرامی از دندان جدا کنید و مجدد کامپوزیت را مستقیماً کیور کنید.
۸. در این مرحله ونیر شما نیاز به حداقل پرداخت را دارد و یونیر این مرحله را برای شما به حداقل زمان با بهترین فرم و تقارن می‌رساند.
۹. بلافاصله پس از استفاده، به طور کامل قالب را با پد پاک کنید ، خشک و در کیسه قرار داده و سپس داخل اتوکلاو قرار دهید. هیچ گونه باقی مانده ای بر روی قالب به منظور حفظ شفافیت و درخشش باقی نگذارید.

