



ETCH AND BOND

Ultra-Blend™ plus Liner



- لاینر بیواکتیو و ماده پوشش پالپی
- آزاد سازی عالی کلسیم
- عدم نیاز به مخلوط کردن
- عدم حلالیت در بلند مدت
- لایت کیور
- رادیوپاک
- دارای محتوای بالای فیلر
- بسته بندی به صورت تک سرنگی و نوک های مخصوص

Ultra-Blend Plus یک ماده رادیوپاک و فعال شونده با نور است و فرمولاسیون آن شامل کلسیم هیدروکساید در یک بیس از جنس اورتان دی متاکریلات (UDMA) است. در مقایسه با سایر لاینرها، این محصول برای به حداقل رسیدن انقباض پلیمریزاسیون و آزاد سازی عالی کلسیم، دارای محتوای فیلر بالایی است.



golnarnikandandan

www.golnarnikandandan.com

021-71333340

GOLNAR
NIKAN DANDAN



ETCH AND BOND

Ultra-Blend™ plus

دستورالعمل کار با Ultra-Blend™ plus

مرحله اول: برای اکسپوژنهای کوچک، اولترابلند را استفاده کنید و در صورت وسیع بودن، درمان ریشه را آغاز کنید.


مرحله دوم: محلول ضد عفونی Consepsis را ۶۰ ثانیه روی محل قرار دهید (اسکراپ نکنید) و با هوا خشک کنید.

مرحله سوم: (اختیاری) اگر حفره باز شده کمی بزرگ بود، سمان MTAFlow قرار دهید.
مرحله چهارم: اولترابلند را روی دنتین خشک قرار دهید.

مرحله پنجم: اسید فسفریک ۳۵% را به مدت ۱۵ ثانیه قرار دهید، آبکشی و سپس خشک کنید.

مرحله ششم: باندینگ یونیورسال را به مدت ۱۰ دقیقه قرار دهید. ۱۰ ثانیه پوآر هوا بگیری و ۱۰ ثانیه لایت کنید و سپس ترمیم کنید.


نحوه مصرف

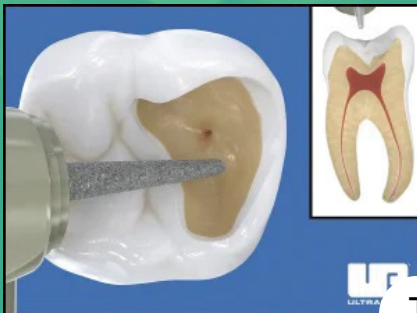

1



2

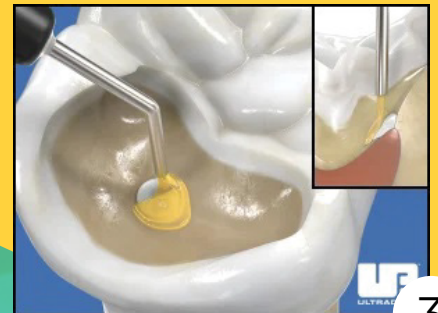

3



4



5



6